



PROTOCOLO DE ESCANEO WSAVA

PREPARACIÓN Y POSICIÓN



Retirar Objetos Metálicos:

Quita cualquier collar, arnés o placa metálica, ya que el metal puede interferir con la señal del lector y evitar que lea el microchip.




Posición Tranquila:

Asegura al animalito en una posición cómoda y tranquila (sentado o acostado de lado) para poder escanear con calma.



LA TÉCNICA DE ESCANEO

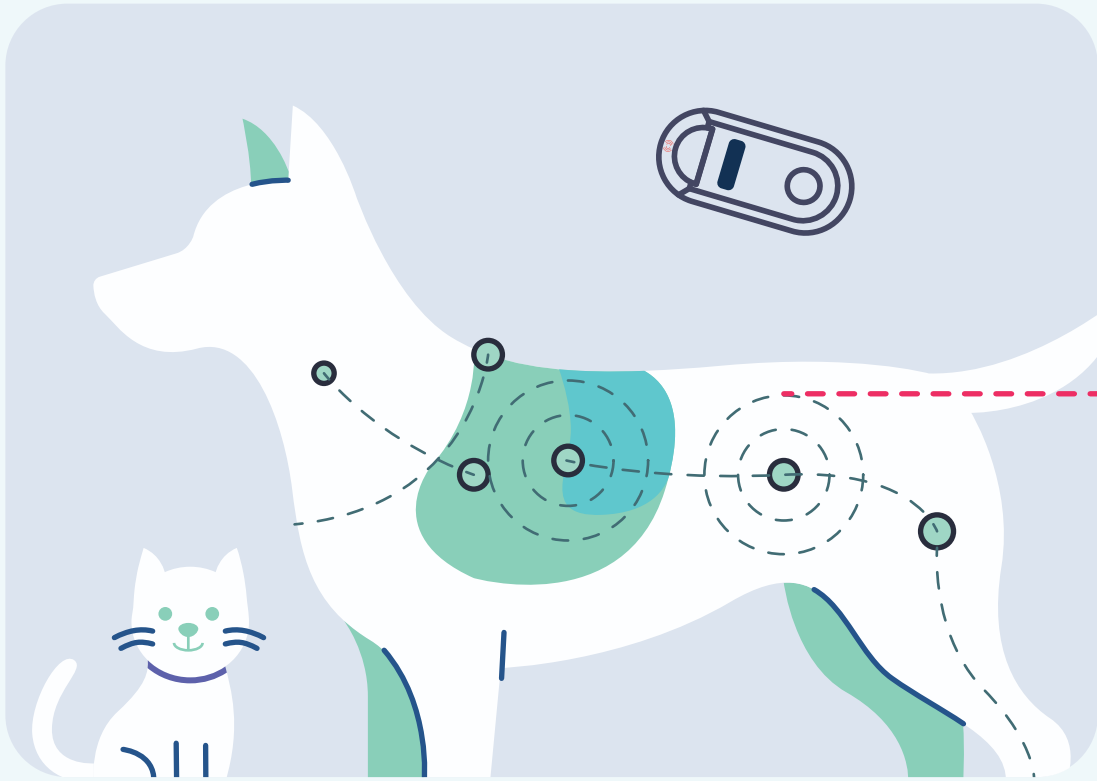

- **Punto de Inicio Principal:** Comienza a escanear en la zona más común: entre los omóplatos (escápulas) y a lo largo de la columna vertebral dorsal.
- **Movimiento:** Mueve el lector lentamente, en forma de "S" o de espiral, comenzando desde la cabeza hacia la cola, y desde la parte superior de la columna hacia los lados.
- **Extender el Área:** Si no se detecta el microchip en la zona dorsal, amplía el escaneo a todo el cuello, ambos hombros y costados del pecho.
- **Razón:** Aunque el sitio de implantación estándar es entre las escápulas, los microchips pueden migrar un poco con el tiempo, a menudo hacia la parte inferior del cuello o los hombros.
- **Repetición y Rotación:** Si no se encuentra, repite el escaneo en la misma área, pero girando ligeramente el lector en diferentes ángulos. El microchip puede estar orientado de una manera que dificulte la lectura inicial.


VERIFICACIÓN



Lectura del Microchip: Anotar el número del microchip (15 dígitos) y repetir el escaneo dos veces.

Verificar en la Base de Datos: Escanear MÍNIMO 10 segundos y revisar la base de datos de registro (guaridaflucky.com).

PUNTOS CLAVE ADICIONALES

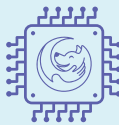

NO es GPS:

Es un identificador único, que se activa al escanear



Compatibilidad

Usa escáneres compatibles con la frecuencia ISO 11784/11785



Rutina

Escanear al animal una vez al año durante los exámenes de rutina